

KATALOG KOŃCÓWEK


DO SKALERÓW

ULTRADŹWIĘKOWYCH



NSK

Skalery ultradźwiękowe Varios 2, Varios

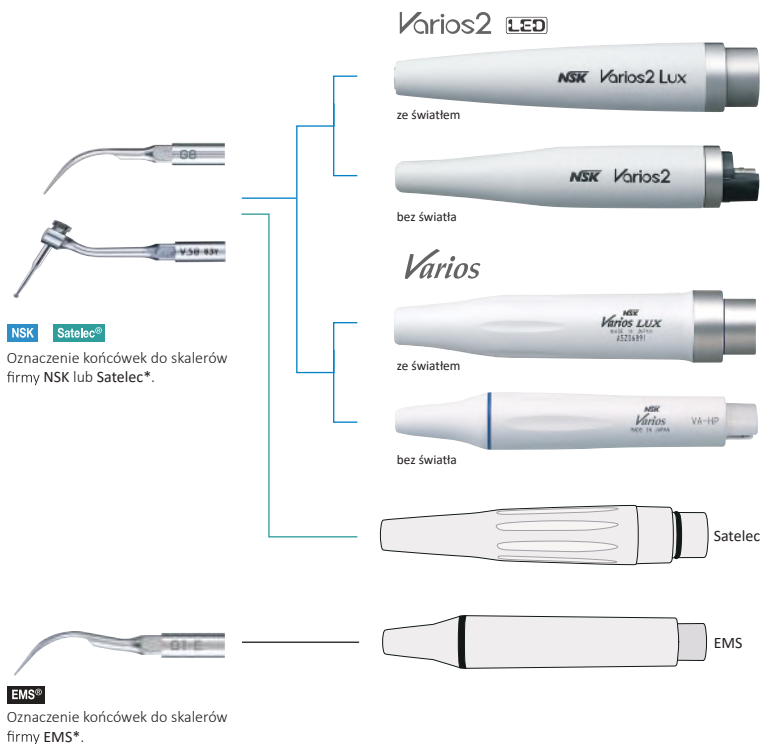

Satelec® *Satelec znak towarowy zastrzeżony przez francuską firmę Acteon SA.

EMS® *EMS znak towarowy zastrzeżony przez szwajcarską firmę Electro Medical Systems SA.



* W celu dokładniejszego pokazania przekroju końcówek, ich rysunki są czterokrotnie większe od wymiaru rzeczywistego.

ZASADY POPRAWNEGO UŻYTKOWANIA SKALERA ULTRADŹWIEKOWEGO

1 USTAWIENIE KOŃCÓWKI W STOSUNKU DO ZĘBA.


Efektywna moc pracy skalera zależy od doboru punktu styku końcówki z powierzchnią zęba. Najlepszy efekt osiąga się, gdy płaszczyzna styku powierzchni końcówki znajduje się w odległości 2-3 mm od czubka końcówki (Rys.1).



Rys.1

2 USTAWIENIE KOŃCÓWKI POD PRAWIDŁOWYM KĄTEM

Dokładając końcówkę do powierzchni zęba pod kątem 15° lub mniejszym uzyskujemy najlepszą kontrolę mocy, nie wzbudzając uczucia dyskomfortu pacjenta (Rys.2).

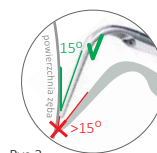

Rys.2

3 SIŁA DOCISKU

Siła docisku końcówki do zęba powinna mieć się w definicji „muśnięcia piórkiem”. Końcówka skalera w czasie kontaktu z powierzchnią zęba powinna być w ciągłym ruchu, aby wykorzystać pełną efektywność jej działania oraz uniknąć niepożądanych uszkodzeń zęba (Rys.3).




Rys.3

4 TRYB I ZAKRES MOCY

Po wybraniu właściwego trybu mocy, zalecamy rozpocząć zabieg z ustawioną najniższą mocą pracy skalera i w zależności od zaobserwowanego efektu stopniowo jej zwiększanie.

Przeznaczenie końcówek

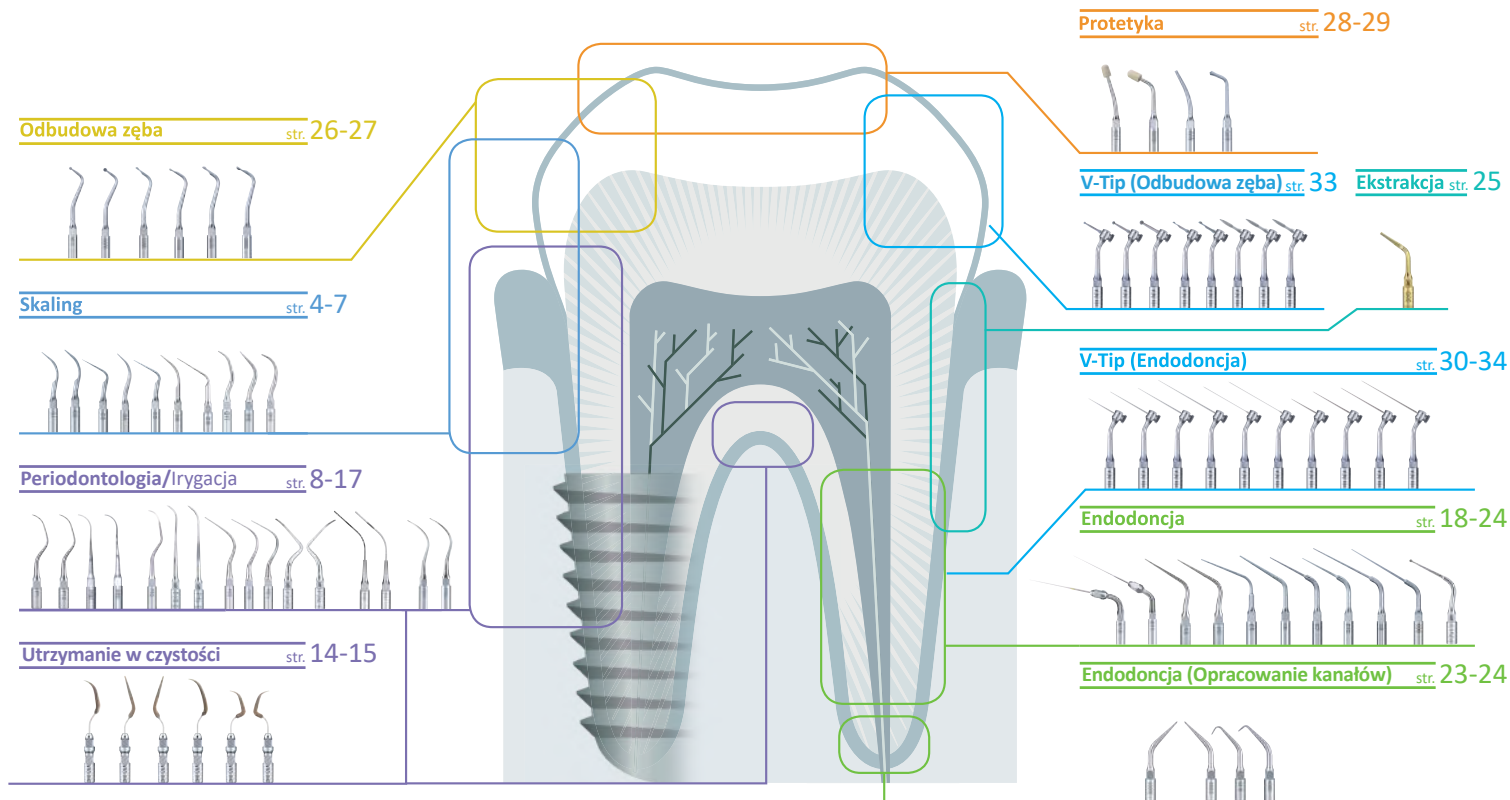

Sterylizacja w termodezynfektorze



Sterylizacja w autoklawie




Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji prezentowanych produktów.

SKALING

MODEL **G1**

Do usuwania:

- kamienia naddziąsłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzęznego.

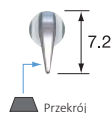

Przekrój

NSK **Satelec®** MODEL **G1**

KOD **Z217101**

EMS® MODEL **G1-E**


KOD **Z291101**



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **G2**

Do usuwania kamienia naddziąsłowego.

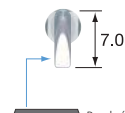

Przekrój

NSK **Satelec®** MODEL **G2**

KOD **Z217102**

EMS® MODEL **G2-E**



KOD **Z291102**



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **G3**

Do usuwania kamienia naddziąsłowego.

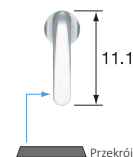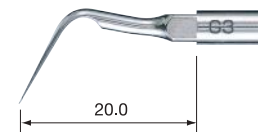

Przekrój

NSK **Satelec®** MODEL **G3**


KOD **Z217103**

EMS® MODEL **G3-E**

KOD **Z291103**



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

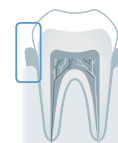

MODEL **G4**

Do usuwania:

- kamienia naddziąstłowego,
- kamienia z dziąsła brzeżnego.



Przekrój

NSK Satelec MODEL **G4**

KOD **Z217104**

EMS MODEL **G4-E**

KOD **Z291104**





Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **G5**

Do usuwania:

- kamienia naddziąstłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzeżnego,
- biofilmu poddziąstłowego.

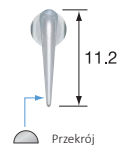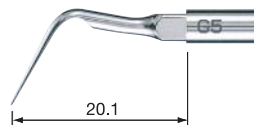

Przekrój

NSK Satelec MODEL **G5**

KOD **Z217105**




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **G6**

Do usuwania:

- kamienia naddziąstłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzeżnego,
- biofilmu poddziąstłowego.

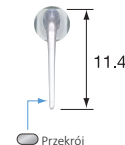

Przekrój

NSK Satelec MODEL **G6**

KOD **Z217106**

EMS MODEL **G6-E**

KOD **Z291106**




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

SKALING

MODEL **G8**

Do usuwania:

- kamienia naddziąsłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzeżnego.

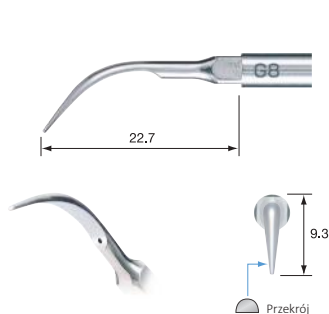

NSK Satelec® MODEL **G8**

KOD **Z217108**




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **G9**

Do usuwania:

- kamienia naddziąsłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzeżnego,
- biofilmu poddziąsłowego.

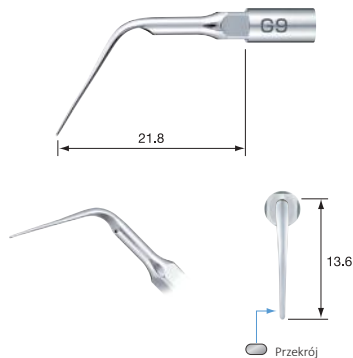

NSK Satelec® MODEL **G9**


KOD **Z217109**



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **G11**

Do usuwania kamienia naddziąsłowego.

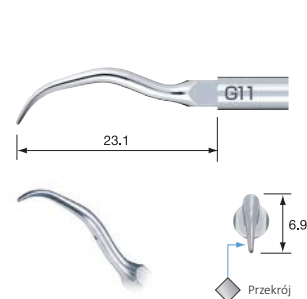

NSK Satelec® MODEL **G11**

KOD **Z217411**




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych




MODEL **G12**

Do usuwania kamienia naddziąstłowego.

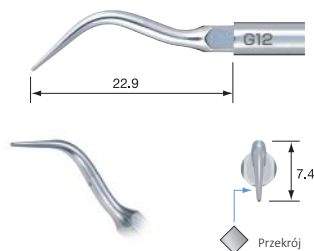

MODEL **G13**


Do usuwania kamienia naddziąstłowego.

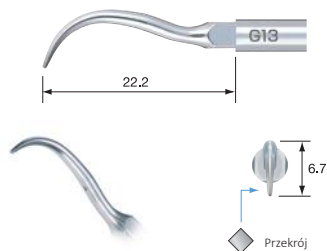

MODEL **G16**

Do usuwania:

- kamienia naddziąstłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzęznego,
- biofilmu poddziąstłowego.

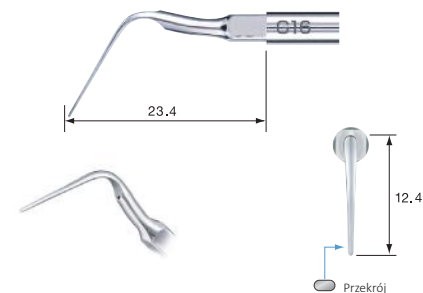

NSK Satelec® MODEL **G12**

KOD **Z217412**



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

NSK Satelec® MODEL **G13**

KOD **Z217413**



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

NSK MODEL **G16**

KOD **Z217120**




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

PERIODONTOLOGIA

MODEL **P1**

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- biofilmu poddziąsłowego.

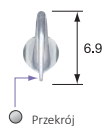



NSK Satelec® MODEL **P1**

KOD **Z217404**

MODEL **P1D**

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu z głębokich kieszonek.

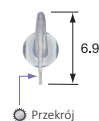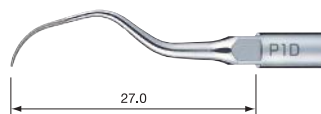


NSK Satelec® MODEL **P1D**

KOD **Z217405**

• Końcówka pokryta nasypem diamentowym




P1 - do zębów jednokorzeniowych
P1D - do zębów jednokorzeniowych i wielokorzeniowych

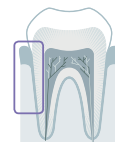

MODEL **P2D**

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu z głębokich kieszonek.

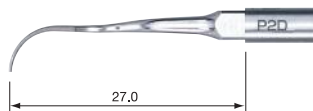

Przekrój



NSK Satelec® MODEL **P2D**

KOD **Z217402**

- Końcówka pokryta nasypem diamentowym
- Końcówka prawoskrętna




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **P3D**

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu z głębokich kieszonek.

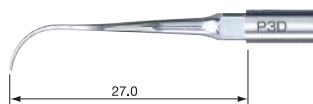

Przekrój



NSK Satelec® MODEL **P3D**

KOD **Z217403**

- Końcówka pokryta nasypem diamentowym
- Końcówka lewoskrętna



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

P2D / P3D





PERIODONTOLOGIA

MODEL **P10**

Do usuwania:

- kamienia poddziąsłowego,
- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z dziąsła brzęnego,
- biofilmu poddziąsłowego.

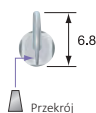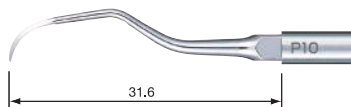

Przekrój



NSK Satelec® MODEL **P10**

KOD **Z217410**

- Końcówka prosta, o ostrej krawędzi



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **P11R**

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu poddziąsłowego z obszaru furkacji.

Do oczyszczania furkacji.



Przekrój



NSK Satelec® MODEL **P11R**

KOD **Z217408**

- Końcówka prawoskrętna, o ostrej krawędzi





Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **P11L**

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu poddziąsłowego z obszaru furkacji.

Do oczyszczania furkacji.

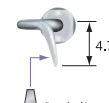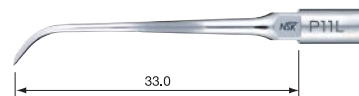

Przekrój




NSK Satelec® MODEL **P11L**

KOD **Z217409**

- Końcówka lewoskrętna, o ostrej krawędzi



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

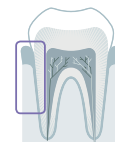

MODEL **P20**

Do usuwania biofilmu poddziąstłowego.



NSK Satelec® MODEL **P20**

KOD **Z217420**

EMS® MODEL **P20-E**

KOD **Z291420**

•Końcówka prosta



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **P21R**

Do usuwania biofilmu poddziąstłowego.



NSK Satelec® MODEL **P21R**

KOD **Z217422**

EMS® MODEL **P21R-E**

KOD **Z291422**


•Końcówka prawoskrętna



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL **P21L**

Do usuwania biofilmu poddziąstłowego.

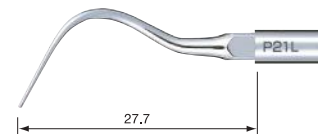

NSK Satelec® MODEL **P21L**

KOD **Z217421**

EMS® MODEL **P21L-E**

KOD **Z291421**

•Końcówka lewoskrętna




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

PERIODONTOLOGIA

MODEL **P25R**

Do usuwania:


- biofilmu poddziąstłowego,
- biofilmu z obszaru furkacji.

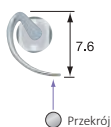

MODEL **P25L**

Do usuwania:

- biofilmu poddziąstłowego,
- biofilmu z obszaru furkacji.

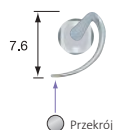

NSK Satelec® MODEL **P25R**

KOD **Z217424**

EMS® MODEL **P25R-E**

KOD **Z291424**

• Kończówka prawoskrętna



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

NSK Satelec® MODEL **P25L**

KOD **Z217425**

EMS® MODEL **P25L-E**


KOD **Z291425**


• Kończówka lewoskrętna



Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

P11R / P11L / P21R / P20 / P21L

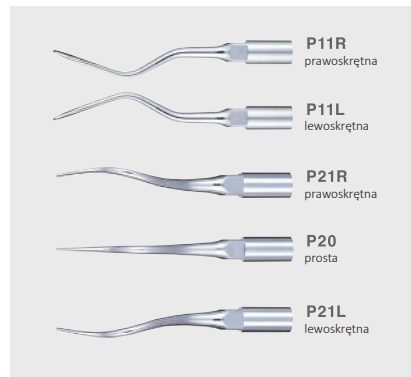


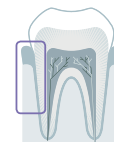

MODEL P26R

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu poddziąsłowego z obszaru furkacji.

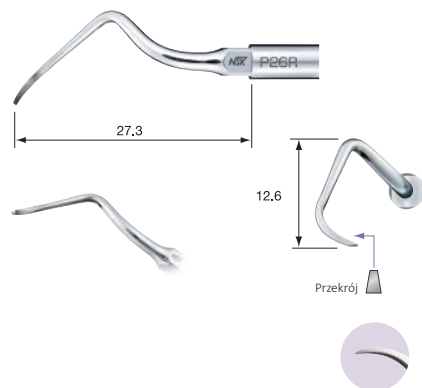

NSK Satelec® MODEL P26R

KOD Z217426

• Końcówka prawoskrętna, o ostrej krawędzi




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

MODEL P26L

Do usuwania:

- kamienia z wąskich przestrzeni międzyzębowych,
- kamienia z głębokich kieszonek,
- biofilmu poddziąsłowego z obszaru furkacji.

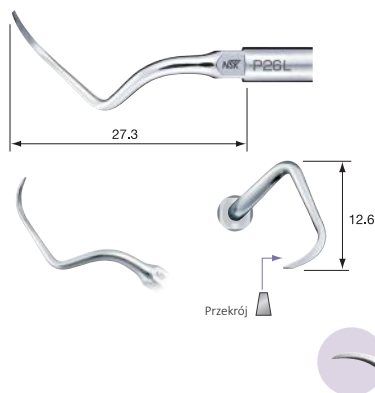

NSK Satelec® MODEL P26L


KOD Z217427

• Końcówka lewoskrętna, o ostrej krawędzi




Do zębów:
jednokorzeniowych,
wielokorzeniowych

P25R / P25L / P26R / P26L

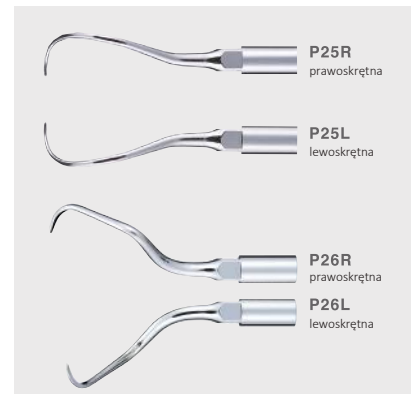

UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI

Do czyszczenia i higienizacji protez i implantów.

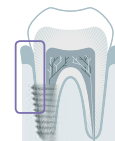

MODEL **V10**




Uchwyt do końcówek typu V.



MODEL **V-P10**

Do utrzymania w czystości protez i implantów. Końcówki wykonane ze specjalnego tworzywa. Dokładnie czyszczą nie uszkadzając implantów oraz części metalowych.

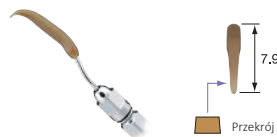

MODEL **V-P11R**

Końcówki V-P11R/L prawe i lewe są dłuższe i zakrzywione w dwóch miejscach, łatwo docierają do trudno dostępnych obszarów, unikając kontaktu z sąsiadującymi zębami i konturami. Ich kształt zaprojektowano tak, aby jak najlepiej pasował do zębów o różnej morfologii, dzięki czemu są wszechstronnymi końcówkami do szerokiego zastosowania, począwszy od zębów przednich aż po przedtrzonowe.



MODEL **V-P11L**



NSK Satelec®

MODEL **V10**

KOD **Z217041**

- Zawiera klucz do wymiany końcówek typu V
- Końcówki nie są dołączone

MODEL **V-P10**

KOD **Y900184**

- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10



MODEL **V-P11R**

KOD **Y1002165**

- Końcówka prawoskrętna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10




MODEL **V-P11L**

KOD **Y1002166**

- Końcówka lewoskrętna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10


UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI

Do czyszczenia i higienizacji protez i implantów.

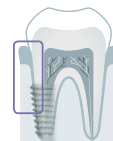

MODEL **V-P12**

V-P12 dłuższa wersja popularnej końcówki skalera V-P10. Przeznaczona do konserwacji implantów i innych uzupełnień protetycznych. Jej kształt zapewnia łatwy dostęp do wszystkich obszarów poddawanych leczeniu.

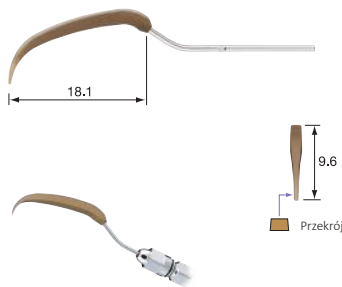

MODEL **V-P12**


KOD **Y1002167**

- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10



MODEL **V-P26R**

Końcówki skalera V-P26R/L zakrzywione są w dwóch miejscach. Szerokie kąty zapewniają dostęp do obszarów niedostępnych dla końcówek skalera V-P11R/L lub dla innych tradycyjnych instrumentów. Przeznaczone do leczenia dalszych powierzchni zębów trzonowych i obszarów zatrzonowcowych, ponieważ czubek końcówki bardzo dokładnie dopasowuje się do morfologicznego kształtu zęba.

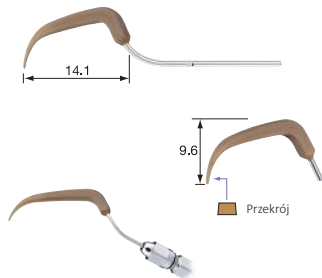


MODEL **V-P26R**

KOD **Y1002168**

- Końcówka prawoskrętna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10



MODEL **V-P26L**

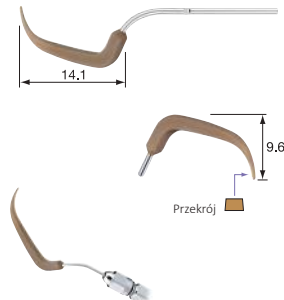

MODEL **V-P26L**

KOD **Y1002169**

- Końcówka lewoskrętna
- Pakowane po 3 szt.
- Opakowanie nie zawiera uchwytu V10

Starter Kit



NSK Satelec®

MODEL

Perio-Control Tips Starter Kit

KOD **Y1002606**

Zestaw podstawowy (bazowy):


- Uchwyt V10
- Klucz do mocowania końcówek typu E
- V-P11R, V-P11L, V-P26R, V-P26L (po 1 szt.)

PERIODONTOLOGIA (IRYGACJA I CZYSZCZENIE)

Do skutecznego oczyszczania kieszonek, np. po zabiegu skalingu.


MODEL **P40**

- Bezpieczne stosowanie niezależnie od stanu kieszonek.
- Oznaczone wartości 3 mm i 6 mm.

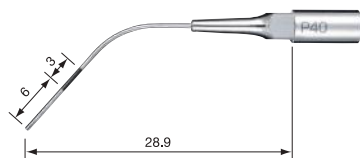

MODEL **P41**

- Bezpieczne stosowanie niezależnie od stanu kieszonek.
- Oznaczone wartości 3 mm i 6 mm.

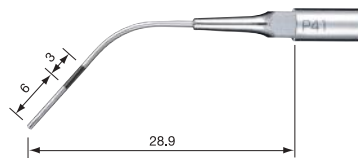

NSK Satelec® MODEL **P40**


KOD **Z217550**

- Średnica wierzchołka końcówki $\varnothing 0,6$ mm


NSK Satelec® MODEL **P41**

KOD **Z217555**

- Średnica wierzchołka końcówki $\varnothing 0,8$ mm

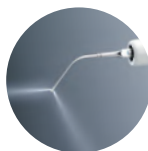

- Irygacja z dwóch otworów na wierzchołku.
- Skutecznie czyści niezależnie od kąta wprowadzenia.
- Zaokrąglony wierzchołek dla bezpieczeństwa przyzębia.

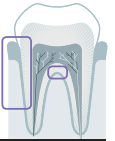

MODEL **Perio Kit A**



NSK Satelec®
MODEL **Perio Kit A**

Y900144

- Zestaw podstawowy Typ A:
- P1D, P2D, P3D, P10 (po 1 szt.)
 - Uchwyt

MODEL **Perio Kit B**



NSK Satelec®
MODEL **Perio Kit B**

Y900145


- Zestaw podstawowy Typ B:
- P20, P25R, P25L, (po 1 szt.)
 - Uchwyt

ENDODONCJA

Pilniki i końcówki do zabiegów poszerzania, przepłukiwania, wypełniania kanałów korzeniowych.

MODEL E4

- Do usuwania ciał obcych.
- Do poszerzania kanałów.

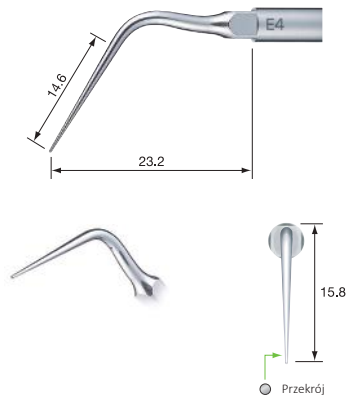

NSK Satelec® MODEL E4

KOD Z217428

- Średnica wierzchołka końcówki $\varnothing$ 0,6 mm

MODEL E7

- Do usuwania wypełnienia.
- Do usuwania ciał obcych z kanałów.



NSK Satelec® MODEL E7

KOD Z217307

- Nie wymaga stosowania wody.

MODEL E8

- Do usuwania wypełnienia.
- Do usuwania ciał obcych z kanałów.




NSK Satelec® MODEL E8

KOD Z217308


- Nie wymaga stosowania wody.



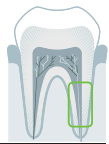

MODEL E4D

- Do czyszczenia i wygładzania kanałów.
- Do poszerzania kanałów korzeniowych.

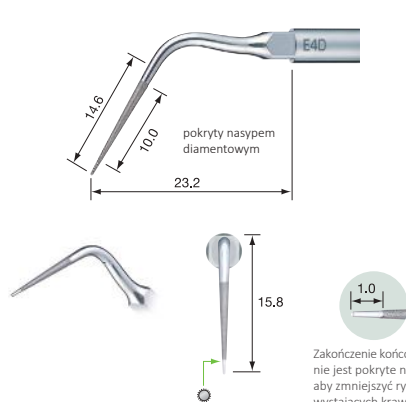

NSK Satelec® MODEL E4D

KOD Z217528

- Końcówka pokryta nasypem diamentowym

MODEL E7D

- Do poszerzania kanałów korzeniowych.



NSK Satelec® MODEL E7D


KOD Z217317

- Końcówka pokryta nasypem diamentowym



MODEL E8D

- Do poszerzania kanałów korzeniowych.

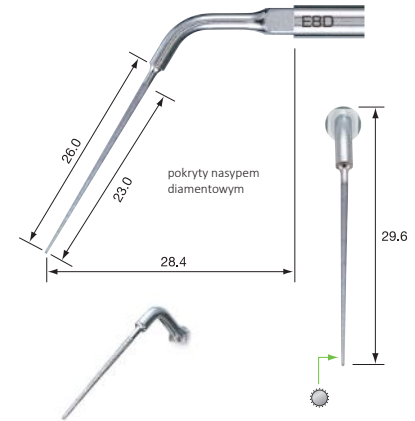

NSK Satelec® MODEL E8D

KOD Z217318

- Końcówka pokryta nasypem diamentowym

ENDODONCJA

MODEL E5

Do kondensacji bocznej.



NSK Satelec® MODEL E5


KOD Z217305

• Nie wymaga stosowania wody.



MODEL E6

Do kondensacji bocznej.

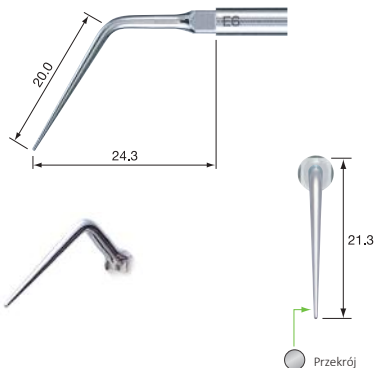

NSK Satelec® MODEL E6

KOD Z217306

• Nie wymaga stosowania wody.



MODEL E15D

- Do lokalizacji kanałów korzeniowych.
- Do usuwania obliteracji.




NSK Satelec® MODEL E15D

KOD Z217319


• Zakończenie pokryte nasypem diamentowym



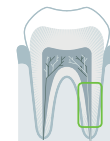

MODEL E11

Uchwyt do pilników typu U pod kątem 120°.

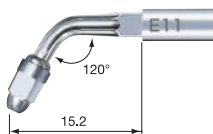


- Średnica trzonu $\varnothing$ 0,8mm
- Do czyszczenia kanałów korzeniowych
- Do zębów przednich
- Zawiera klucz do wymiany pilników

NSK Satelec® MODEL E11

KOD Z217031

MODEL E12

Uchwyt do pilników typu U pod kątem 95°.

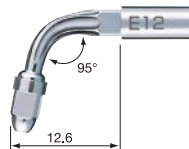

- Średnica trzonu $\varnothing$ 0,8mm
- Do czyszczenia kanałów korzeniowych
- Do zębów tylnych
- Zawiera klucz do wymiany pilników


NSK Satelec® MODEL E12

KOD Z217032



W uchwycie kątowym typu U, zawsze należy stosować pilniki o długości podanej w poniższej tabeli. Stosowanie pilników o innych długościach może spowodować złamanie pilnika w trakcie wykonywania zabiegu.

		#15	#20	#25	#30	#35
E11	Varios2	22 mm	24.5 mm	22 mm	22 mm	22 mm
	Varios	22-23 mm	22-23 mm	23-25 mm	23-25 mm	24-26 mm
E12	Varios2	22 mm	24.5 mm	24.5 mm	24.5 mm	22 mm
	Varios	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm	21-25 mm

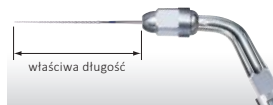

MODEL U Files

Wymienne pilniki typu U.

Długość: 33 mm. Trzon $\varnothing$ 0,8 mm

MODEL Ufiles 33 mm / #15

KOD
Y900062

MODEL Ufiles 33 mm / #20

KOD
Y900063

MODEL Ufiles 33 mm / #25

KOD
Y900064

MODEL Ufiles 33 mm / #30


KOD
Y900065

MODEL Ufiles 33 mm / #35

KOD
Y900066


- Poszczególne typy pilników pakowane są po 6 szt.

ENDODONCJA

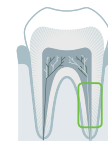

MODEL **Endo Kit E11**

Do zębów przednich.

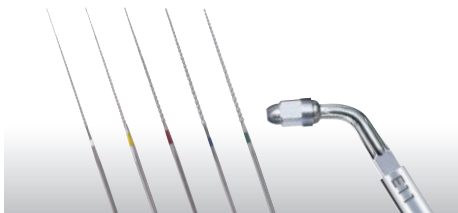

NSK Satelec®


MODEL **Endo Kit E11**

KOD **Y900146**

- 120° - uchwyt do pilników typu U
- Pilniki o długości 33 mm: #15, #20, #25, #30, #35, pakowane po 6 szt.
- Klucz do wymiany pilników

MODEL **Endo Kit E12**

Do zębów tylnych.

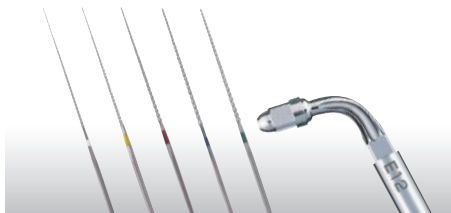


NSK Satelec®

MODEL **Endo Kit E12**

KOD **Y900147**

- 95° - uchwyt do pilników typu U
- Pilniki o długości 33 mm: #15, #20, #25, #30, #35, pakowane po 6 szt.
- Klucz do wymiany pilników


ENDODONCJA (WSTECZNE OPRACOWANIE KANAŁU)

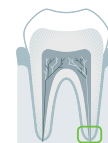

MODEL **E30RD**

MODEL **E30LD**

Wierzchołek końcówki pokryty nasypem diamentowym, umożliwia skuteczne usuwanie zębiny z okolicy wierzchołkowej.

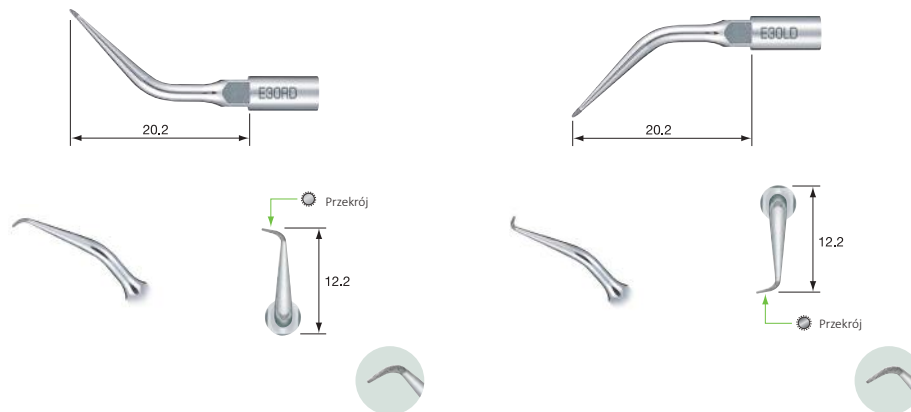

Dostępne są dwa rodzaje kątowych końcówek skalera (90°, 70°) do zębów przednich oraz dwa rodzaje zakrzywionych końcówek skalera (prawo, lewo) do zębów trzonowych.

NSK Satelec® MODEL **E30RD**

KOD **Z217212**

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki zagięty w prawo
- Do zębów tylnych

NSK Satelec® MODEL **E30LD**

KOD **Z217213**

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki zagięty w lewo
- Do zębów tylnych





ENDODONCJA (WSTECZNE OPRACOWANIE KANAŁU)



MODEL **E31D**



Wierzchołek końcówki pokryty nasypem diamentowym, umożliwia skuteczne usuwanie zębiny z okolicy wierzchołkowej.

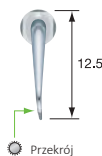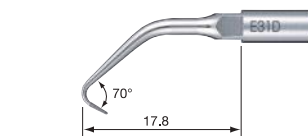

Przekrój



MODEL **E32D**

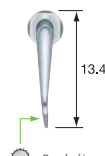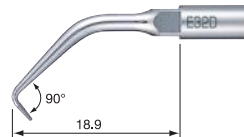

Przekrój



NSK Satelec® MODEL **E31D**

KOD **Z217210**

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki zagięty w prawo
- Do zębów przednich i tylnych (pod kątem 70°)

NSK Satelec® MODEL **E32D**

KOD **Z217211**

- Zakończenie pokryte nasypem diamentowym
- Wierzchołek końcówki zagięty w lewo
- Do zębów tylnych (pod kątem 90°)

MODEL **Retro Kit**

- Zestaw podstawowy



NSK Satelec®

MODEL **Retro Kit**

KOD **Y900149**



- E30RD, E30LD, E31D, E32D po 1 szt.
- Klucz: 1 szt.

EKSTRAKcja


Do syndesmotomii, usuwania zębów ankylotycznych.

MODEL **G95**

Ekstrakcja zęba jest możliwa bez nadmiernego usuwania kości zębodołu wokół pozostałego korzenia, z zachowaniem morfologicznego kształtu zębodołu.

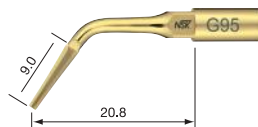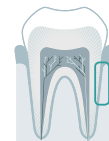

Porusza się w kierunkach bliżso-dalszym, przedśionkowo-językowym, oraz w górę i w dół, dostarczając wodę w kierunku dowerchołkowym (pompowanie). W trakcie tego ruchu zwróć szczególną uwagę na przepływ płynu irygacyjnego.

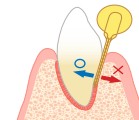

Aby zapobiec uszkodzeniu kości zębodołowej, przesunij wierzchołek końcówki wzdłuż krawędzi długiej osi zęba.

- Zastosowanie irygacji poprawia wydajność.
- W przypadku stosowania systemu irygacji Varios 970.
- G95 można stosować w urządzeniu ultradźwiękowym NSK.

NSK MODEL **G95**

KOD **Z217705**

• Pokryta azotkiem tytanu (TiN) • Grubość 0,7mm • Podwójna krawędź, tnąca w trzech płaszczyznach

Ekstrakcja korzeni (usuwanie górnej lewej dwójki)



Rysunek poglądowy

Ząb zatrzymany (usuwanie dolnej lewej ósemki)



Uwaga, nie stosuj nadmiernej siły, tak jak w przypadku zastosowania dźwigni.

Rysunek poglądowy

ODBUDOWA ZĘBA

MODEL **G61D**

- Do usuwania próchnicy.
- Do opracowania powierzchni zęba.



MODEL **G62D**

- Do usuwania próchnicy.
- Do opracowania powierzchni zęba.



MODEL **G65D**

- Do usuwania próchnicy z powierzchni styčných. Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na uszkodzenie sąsiedniego zęba.



NSK Satelec® MODEL **G61D**

KOD **Z217601**

- Kuliste zakończenie pokryte nasypem diamentowym

NSK Satelec® MODEL **G62D**

KOD **Z217602**


- Kuliste zakończenie pokryte nasypem diamentowym

SK Satelec® MODEL **G65D**

KOD **Z217605**

- Kuliste zakończenie pokryte nasypem diamentowym



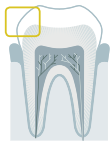

MODEL **G66D**

- Do usuwania próchnicy z powierzchni bliższych zębów przednich.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na uszkodzenie sąsiedniego zęba.



MODEL **G67D**

- Do usuwania próchnicy z powierzchni styčných, w odcinku bocznym.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na uszkodzenie sąsiedniego zęba.



MODEL **G68D**

- Do usuwania próchnicy z powierzchni styčných, w odcinku przednim.
- Półkolisty wierzchołek końcówki nie pozwala na uszkodzenie sąsiedniego zęba.



NSK Satelec® MODEL **G66D**

KOD **Z217606**

- Kuliste zakończenie pokryte nasypem diamentowym



NSK Satelec® MODEL **G67D**

KOD **Z217607**

- Kuliste zakończenie pokryte nasypem diamentowym



NSK Satelec® MODEL **G68D**

KOD **Z217608**

- Kuliste zakończenie pokryte nasypem diamentowym



PROTETYKA




MODEL G21

- Do stosowania w stomatologii adhezyjnej (wykonywanie wypełnień).
- Do cementowania małych uzupełnień w odcinku przednim, np. licówki, inlay.



MODEL G22

- Do stosowania w stomatologii adhezyjnej (wykonywanie wypełnień).
- Do cementowania małych uzupełnień w odcinku bocznym, np. korona, onlay.

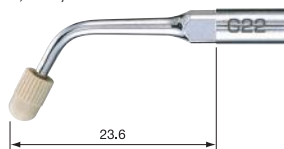

MODEL Tip Cap



NSK Satelec® MODEL G21

KOD Z217010

- Do zębów przednich
- 3 wymienne nasadki
- Nie wymaga wody

NSK Satelec® MODEL G22

KOD Z217020

- Do zębów tylnych
- 3 wymienne nasadki
- Nie wymaga wody



MODEL Tip Cap

KOD Y140751

- Nasadki do G21 i G22
- Można sterylizować w autoklawie
- Zestaw zawiera 10 sztuk.





MODEL **G26**

Do usuwania wkładów (ø1,3 mm grubości).



NSK Satelec® MODEL **G26**

KOD **Z217206**



MODEL **G28**

Do kondensacji amalgamatu.



NSK Satelec® MODEL **G28**

KOD **Z217208**

• Nie wymaga wody



V-TIP (WIELOFUNKCYJNY SYSTEM WYMIENNYCH KOŃCÓWEK)

System uchwytów NSK Varios V-Tip jest innowacyjny, wielozadaniowy i ekonomiczny. Uchwyt V-Tip jest oddzielnym elementem, można go łatwo i niedrogo wymienić. System V-Tip oferuje bezpieczeństwo zabiegów, elastyczność i możliwość rozbudowy. Jedna końcówka spełnia szerokie wymogi bardzo wielu zastosowań klinicznych.

Odbudowa zęba

Do zabiegów minimalnej interwencji



Do zabiegów finalnych




Do usuwania próchnicy




Endodoncja

Do czyszczenia kanałów korzeniowych

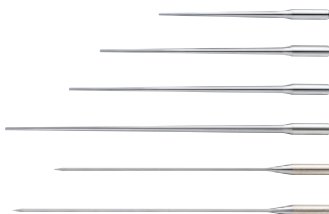

Do powiększania kanałów korzeniowych

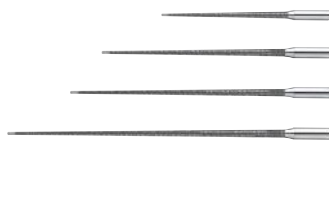

Kompatybilny z uchwytem V30, typoszereg wymiennych końcówek, jest przeznaczony do wykonywania zabiegów typu poszerzanie, opracowywanie i oczyszczanie kanałów korzeniowych, usuwanie próchnicy, złamanych narzędzi oraz lokalizacji ujść kanałów korzeniowych.

MODEL **V30**



KOD **Z217030**

- Uchwyt do końcówek typu V
- Zawiera klucz do końcówek typu E
- Końcówki nie są dołączone



V30


kąt nachylenia 120°

V-TIP (ENDODONCJA)



Do czyszczenia kanałów korzeniowych.

MODEL **V-S50**

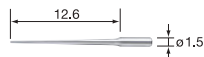

KOD **Y900169**

• Długość całkowita 17mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S51**



KOD **Y900170**

• Długość całkowita 23mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL **V-S52**

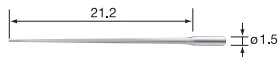

KOD **Y900171**

• Długość całkowita 26mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-S53**



KOD **Y900172**

• Długość całkowita 32mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL **V-N50**

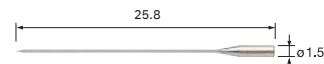

KOD **Y900182**


• Irygacja Ni-Ti 17 mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL **V-N51**

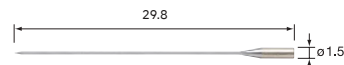


KOD **Y900183**

• Irygacja Ni-Ti 21 mm • W opakowaniu 3 szt.

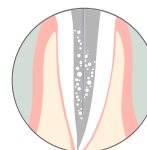


Do czyszczenia kanałów

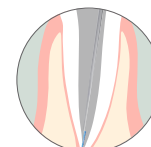


Do usuwania złamanych pilników

V-TIP (ENDODONCJA)

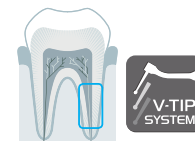

Do poszerzania kanałów korzeniowych.


MODEL V-S50D

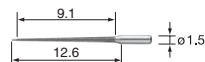

KOD Y900173

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 17mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-S51D

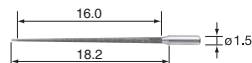

KOD Y900174

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 23mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-S52D

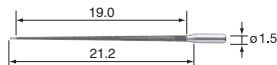

KOD Y900175


• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 26mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL V-S53D

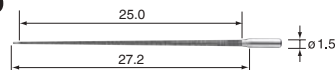


KOD Y900176

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 32mm • W opakowaniu 3 szt.

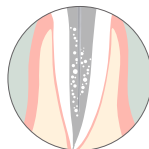

Do czyszczenia kanałów

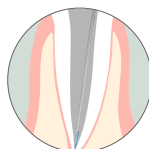

Do usuwania złamanych pilników



Zakończenie końcówki na odcinku 1mm nie jest pokryte nasypem diamentowym, aby zmniejszyć ryzyko powstawania wystających krawędzi.

V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA)

Zaletą cięcia ultradźwiękowego jest minimalny ruch końcówki, co pozwala na usunięcie jedynie zębiny z próchnicą, przy jednoczesnym zachowaniu zdrowej tkanki. Krwawienie podczas leczenia ubytków przyszykowych jest minimalne, co przyspiesza gojenie.

Do zabiegów minimalnej interwencji.

MODEL V-G70



KOD Y900118

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 12,5mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G71



KOD Y900119

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 12,5mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G72

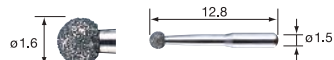

KOD Y900120

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 12,8mm • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G75

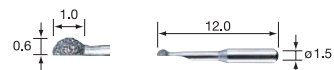

KOD Y900121

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 12,0mm • W opakowaniu 3 szt.

MODEL V-G76

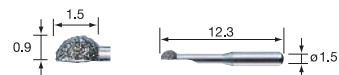

KOD Y900122

• Pokryta nasypem diamentowym • Długość całkowita 12,3mm • W opakowaniu 3 szt.



Do usuwania próchnicy przyszykowej



Do usuwania próchnicy korzeniowej




Do usuwania próchnicy z powierzchni stycznych



Do usuwania próchnicy korzeniowej

V-TIP (ODBUDOWA ZĘBA)


System NSK Varios V-Tip został opracowany, do realizowania zabiegów „minimalnej interwencji”, jako alternatywa dla instrumentów rotacyjnych. Varios V-Tip oferuje precyzyjną i skuteczną technologię cięcia ultradźwiękowego.

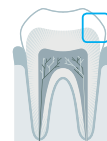

Do opracowywania, wygładzania i polerowania wypełnień.

Do usuwania próchnicy.


MODEL V-G77 Gradacja normalna

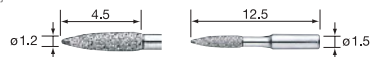

KOD Y900165

• Pokryta nasypem diamentowym • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G78 Gradacja drobna

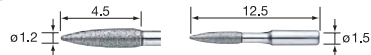

KOD Y900166

• Pokryta nasypem diamentowym • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-G79 Gradacja bardzo drobna

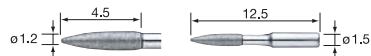

KOD Y900167

• Pokryta nasypem diamentowym • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-S1

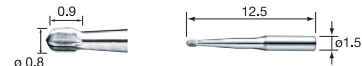

KOD Y900161

• Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.


MODEL V-S3

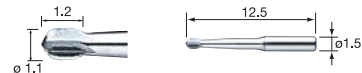

KOD Y900162

• Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.

MODEL V-S33

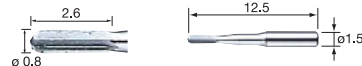

KOD Y900163

• Ze stali nierdzewnej • W opakowaniu 3 szt.



Do poszerzania kanałów korzeniowych

Karta kontrolna do pomiaru długości i stopnia zużycia końcówek.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY KONTROLNEJ

Jak sprawdzić stopień zużycia końcówek

1. Końcówkę przeznaczoną do pomiaru wsuń w odpowiednie nacięcie po prawej stronie karty.
2. Porównaj wynik stopnia zużycia końcówki z podanym na karcie.
3. Po zapoznaniu się z nim postępuj zgodnie z podanymi niżej zaleceniami:

Zielony. Końcówka jest odpowiedniej długości.

Wymiana nie jest konieczna.



Żółty. Końcówka na odcinku ~1 mm jest zużyta.

*Zalecana jest wymiana końcówki.




Czerwony. Końcówka na odcinku ± 2 mm jest bardzo zużyta.

Konieczna jest wymiana końcówki.



* Dla bezpieczeństwa i efektywności zabiegu NSK zaleca wymianę końcówki, gdy jej czubek został zużyty na odcinku ~1mm.

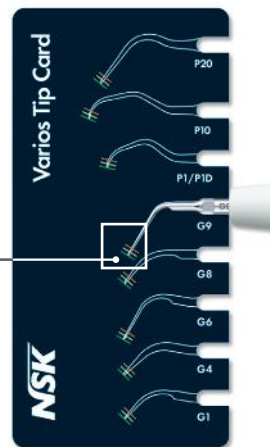

Klucz do wymiany końcówek ograniczający siłę (moc) skrętu.

Do końcówek: G1- G68D, G95, P1- P41 E15D, E30RD, E30LD, E31D, E32D i V-Tip

Uwaga! Należy wcisnąć końcówkę w otwór klucza aż do usłyszenia wyraźnego kliknięcia.



Klucz Typu E

Do końcówek: E4, E4D, E5, E6, E7, E7D, E8, E8D, E11, E12 oraz uchwyty V30 (V-TIP)



Wydany przez

makRomed
AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL

www.makromed.com.pl |
biuro@makromed.com.pl |
+48 42 678 88 54 |
ul. Czechosłowacka 1 |
92-216 Łódź |

Create it 