



Panel sterowania

Ustawianie irygacji

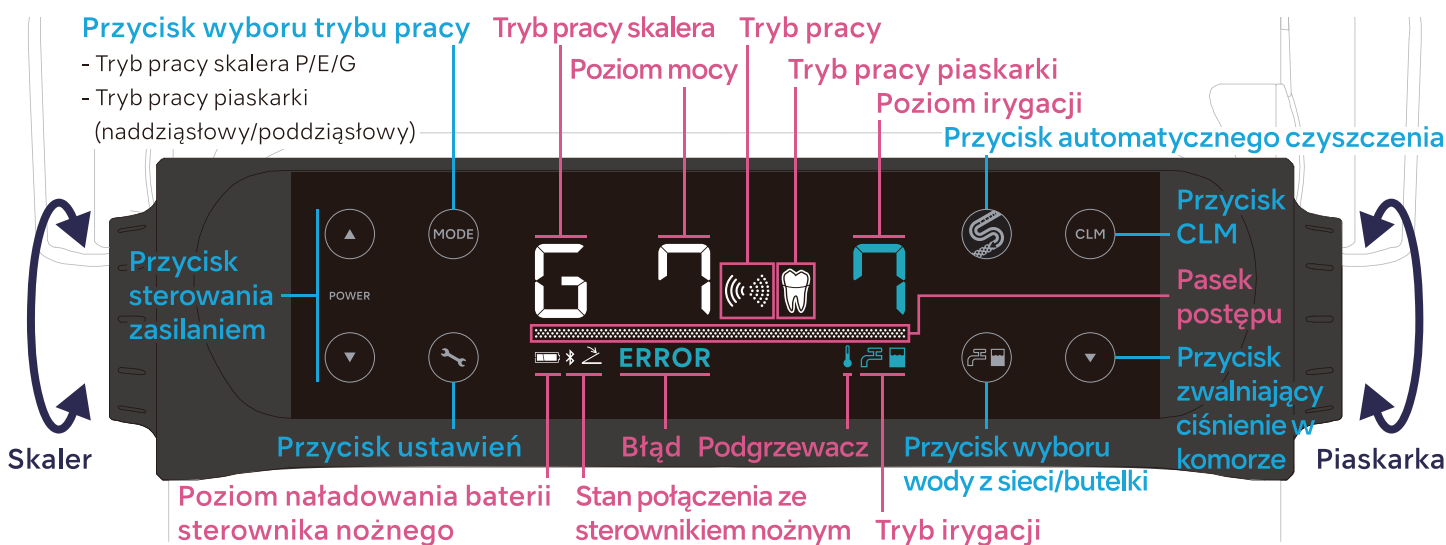


Sterownik nożny

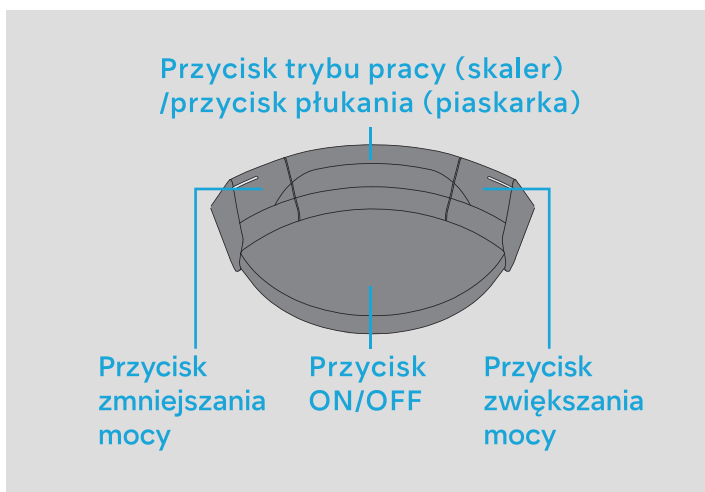

Używanie skalera


- ① Weź rękojęść skalera. ② Wybierz tryb skalera (P/E/G).
- ③ Ustaw poziom mocy. ④ Wybierz metodę irygacji.
- ⑤ Dostosuj poziom irygacji. ⑥ Naciśnij przycisk ON/OFF.

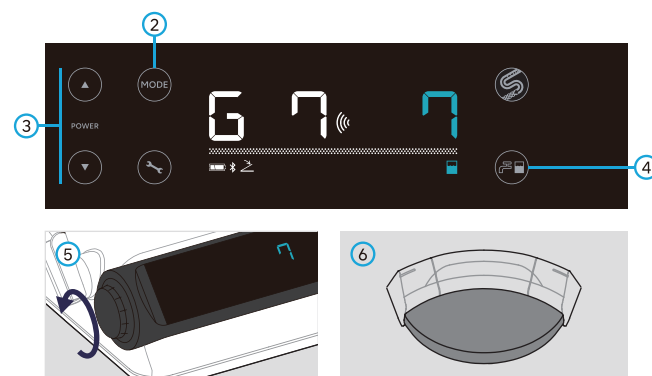

Używanie piaskarki

	Tryb	Komora	Rękojeść	Dysza	Zastosowanie	Proszek
						
						
						
						


- 1 Weź rękojeść piaskarki.
- 2 Wybierz tryb piaskarki naddziałowy/poddziałowy.
- 3 Ustaw poziom mocy.
- 4 Dostosuj poziom irygacji.
- 5 Naciśnij przycisk ON/OFF.

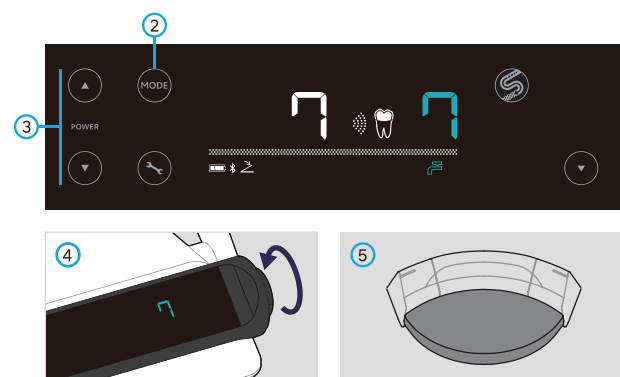

Autoczyszczenie

	Częstotliwość wykonywania automatycznego czyszczenia	Aktualne wykorzystanie Varios Combi Pro2		
		Skaler i piaskarka	Tylko piaskarka	Tylko skaler
Używanie funkcji automatycznego czyszczenia	Po każdym zabiegu	W(proszek)	W(proszek)	—
	Raz dziennie (po ostatnim zabiegu)	D	P	W (skaler)


W (Skaler): Usuwanie wody
W (Piaskarka): Usuwanie wody i proszku czyszczącego
P: Usuwanie wody z przewodu rękojeści
 Usuwanie proszku z obiegu
 Zwalnianie ciśnienia w komorze
D: Usuwanie wody z przewodu rękojeści
 Usuwanie proszku z obiegu
 Zwalnianie ciśnienia w komorze

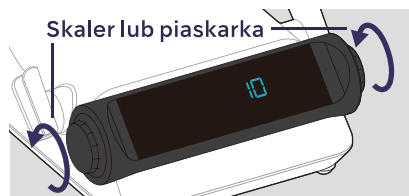

Ustaw poziom irygacji na 10.



Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż pojawi się komunikat "AC".

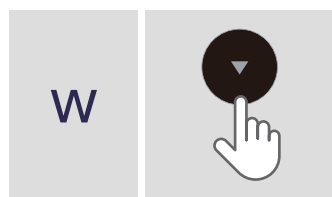

Wybierz "W".




Włóż rękojeść z przewodem do uchwytu CLM. Dotknij.




lub



Po wyświetleniu "Fin", dotknij.

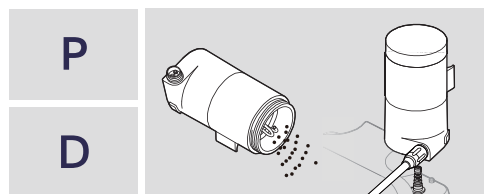

Usuń proszek i podłącz komorę.

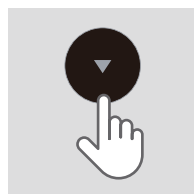

Wybierz "D" lub "P".



Włóż rękojeści z przewodami do uchwytu CLM. Dotknij.




Po wyświetleniu "Fin", dotknij.


Odkazanie / zapobieganie tworzeniu się biofilmu (tryb CLM)




Napełnij butelkę CLM środkiem b.clean (nierozcieńczonym).

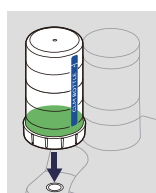


Włóż butelkę CLM.

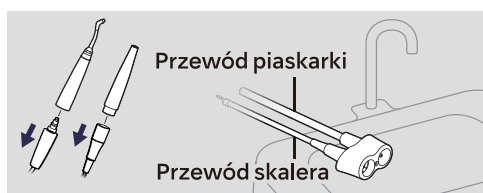

Odłącz przewody od obu rękojeści i włóż je do uchwytu CLM.

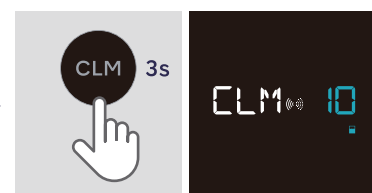


Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż pojawi się powyższy komunikat.

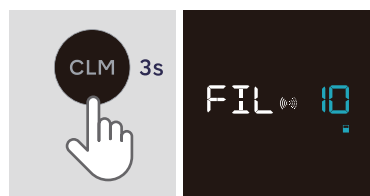

Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż uruchomi się tryb CLM.




Po wyświetleniu powyższego komunikatu należy wyłączyć zasilanie i odczekać co najmniej 12 godzin.

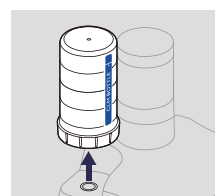

Włącz zasilanie. Wyjmij butelkę CLM.




Napełnij zdezynfekowaną butelkę irygacyjną wodą pitną.

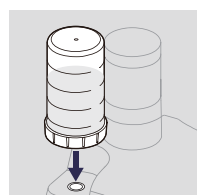

Włóż butelkę irygacyjną.



Dotknij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż rozpocznie się opróżnianie.

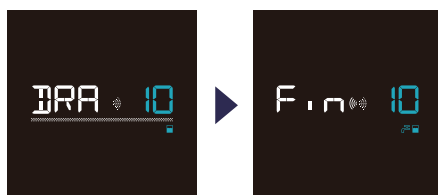

Tryb CLM jest zakończony po wyświetleniu powyższego komunikatu. Dotknij, aby przejść do ekranu powitalnego.